



Philips Médicas blue light

Médicas blue light

Mais de 400 estudos clínicos independentes comprovaram que as lâmpadas UVB Narrowband PL-L/PL-S são mais seguras e mais eficientes do que quaisquer outras lâmpadas da sua classe. As versões PL-L/PL-S proporcionam uma liberdade de concepção adicional para os fabricantes de sistemas, pois são lâmpadas que poupam espaço, compactas e de extremidade única. É ainda assegurada uma maior flexibilidade, visto que utilizam os mesmos casquilhos de lâmpada que as lâmpadas de iluminação geral e, como tal, os mesmos balastros universais. A eficácia do tratamento líder na sua classe é um resultado do seu muito estreito comprimento de onda: entre 305 e 315 nm com um pico a 311 nm. Este é o comprimento de onda mais eficaz para o tratamento da psoríase e é, como tal, muito mais dirigido. Como resultado, os tempos de exposição são muito mais reduzidos e isto, por seu lado, leva a uma redução dos efeitos secundários, como a vermelhidão e a comichão na pele. Estas características tornam-nas ideais para tratamentos de fototerapia em doenças como psoríase, parapsoríase, vitiligo, dermatite atópica e micose fúngica. Além do mais, como a dose global desta radiação de banda estreita pode ser controlada de forma apertada, estas lâmpadas são adequadas para terapias em casa.

Benefícios

- Mínimo de efeitos secundários, como vermelhidão, comichão e queimaduras
- Período de exposição mais curto e menos radiação eritematosa do que com as lâmpadas UVB convencionais
- Efeito terapêutico otimizado com efeitos secundários mínimos
- Comprovado como o mais eficaz para a pele

Médicas blue light

Características

- Pico de emissão a 311 nm
- Banda estreita
- Fósforo e vidro especialmente desenvolvidos
- Testado a nível mundial em mais de 400 testes clínicos

Aplicação

- Psoríase, parapsoríase, vitiligo, dermatite atópica, micose fúngica, outras doenças de pele

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Versions




XPPR_XUVBPLL_2G11_4P-Product photo



XPPR XUVBPLS 0001


Desenho dimensional

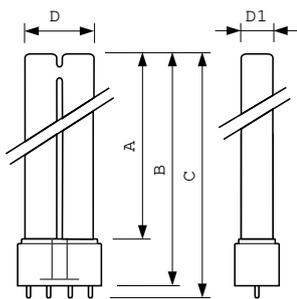

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 36W/01/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm

Médicas blue light

Desenho dimensional

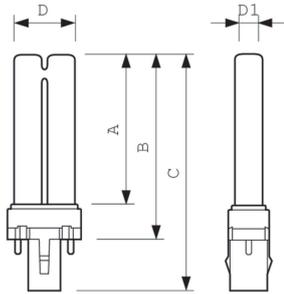

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	129 mm	144,5 mm	167 mm

Caraterísticas técnicas da luz

Código da cor	01
---------------	----

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Casquilho
86889340	PL-L 36W/01/4P 1CT/25	2G11

Order Code	Full Product Name	Casquilho
86891680	PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX	G23

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Designação da cor
86889340	PL-L 36W/01/4P 1CT/25	-

Order Code	Full Product Name	Designação da cor
86891680	PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX	Ultravioleta B

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de Energia
86889340	PL-L 36W/01/4P 1CT/25	0,435 A	36 W

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de Energia
86891680	PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX	0,17 A	8,6 W

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Formato da lâmpada
86889340	PL-L 36W/01/4P 1CT/25	2xT16

Order Code	Full Product Name	Formato da lâmpada
86891680	PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX	2XT12

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)
86889340	PL-L 36W/01/4P 1CT/25	4,4 mg

Order Code	Full Product Name	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)
86891680	PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX	3,0 mg

